

Umstellung der NaF-Monovette auf GlucoEXACT® - Präanalytik

Nach den aktuellen Richtlinien für die Diabetesdiagnostik (Deutschen Diabetes-Gesellschaft, DDG) wird die Glukose aus dem Plasma wegen einer effektiveren Glykolysehemmung in Zukunft aus der sog. GlucoEXACT-Monovette bestimmt. Durch einen speziellen Citratpufferzusatz ist bei Verwendung dieser Monovetten eine nahezu vollständige Glykolysehemmung gewährleistet (nur ca. 1% Plasmaglukoseabfall nach 24 Stunden bei Raumtemperatur vor der Glukosemessung).

Deshalb werden wir die konventionellen NaF-Monovetten sukzessive durch die GlucoEXACT-Monovetten ersetzen.

Bitte beachten Sie, dass die GlucoEXAKT-Monovette unbedingt bis zur Füllmarkierung befüllt und danach mindestens 3 x über Kopf gemischt werden muss.

